

AED CU-SP1のデータの抽出手順

AED CU-SP1本体側ですべきこと

1. 取扱説明書のP27に記載されている次の項目の実施
2. 「5.2.2」救命データの転送

SDカードへの救命データの転送・・・①②③④⑤を実行する。

- ① SDカードをFAT (FAT16)形式にフォーマットします。
- ② CU-SPシリーズのSDカードポートのカバーを開き、SDカードを挿入します。
- ③ **スタンバイモードでi-ボタンを2秒以上押すと**、管理モードに変わります。
- ④ 音声ガイダンスでCU-SPシリーズのソフトウェアのバージョンが知らされます。
- ⑤ **救命データを転送するように音声ガイダンスで指示**されたら、**i-ボタンを押してSDカードにデータを転送**します。転送が完了すると、CU-SPシリーズはCPR音声ガイダンス設定モードに変わります。(CPR音声ガイダンスを変更しないときは電源をOFFにしてください。)

(注) CU-SPシリーズの内部メモリに救命データがない場合

救命データが存在しないことを知らせた後、CU-SPシリーズは、CPR音声ガイダンス設定モード変わります。

既に同じ救命データが、SDカードに転送されている場合、同じ救命データがSDカードに上書き保存することがCU-SPシリーズから知らされます。ショックボタンを押してSDカードの既存の救命データに上書き保存するか、i-ボタンを押して救命データの転送をキャンセルします。

抜粋して説明すると SDカードを本体に挿入します。

i-ボタンを2秒以上長押しして 管理モードに入る

音声ガイダンスが流れますので、救命データを転送するように音声ガイダンスが流れたら i-ボタンを押します。

終了後、電源をOFFにして SDカードを抜きます。

PC側のすべきこと。

「CU-SP1の救命データ抽出方法(SDカード)」の取説P21. CU-EXPERTのダウンロードの方法を実行する。

ダウンロードの際必要となるIDとパスワードは、以下です。

ID : user01 Password : cusp0136

以下は、「救命データ抽出方法」の手順に従う